

術中迅速病理組織検査

〈依頼方法〉

〈予約検査〉となります。急なご依頼の場合や、時間帯によっては受託できない場合もございますので必ず前もって予約の確認を行って下さい。(1~2週間前まで)
必ず右の「術中迅速病理組織・細胞診 申込書」(表一)に必要事項を記入し、FAX もしくは弊社集配担当者にお渡し下さい。

〈提出方法について〉

摘出検体は、15×10×5mm以内で切り出し、生理食塩水を浸したガーゼで包み、冷蔵状態で提出して下さい。

【提出上(採取)の注意事項】

- なるべく脂肪組織を省いて下さい。
- 有鉤ピンセット等で組織に傷をつけないようにして下さい。
- 検査結果連絡先は、執刀医に直接報告できる電話番号をご記入下さい。
- 検体を複数個提出された場合、あるいは弊社にて切り出しが必要な場合は、結果報告までにお時間をいただきますのでご了承下さい。
- 感染症の有る方や検体の種類やサイズによっては、迅速病理組織検査の適応外となります。その場合は、通常の病理 組織検査に変更させていただきますのでご了承下さい。(例:結核等の感染症、骨などの硬組織、脂肪組織が多い検体、 サイズが小さすぎる検体など)
- 可能であれば、本申込書と病理組織検査依頼書のコピーと一緒にご提出下さい。

表一

申込日 年度 一月 一日	
申込書提出料金(税込) 1,000円	
東海細胞研究所 行	
術中迅速病理組織・細胞診 申込書	
病院名	迅速病理組織検査 ・ 血液細胞診検査
検査項目	迅速病理組織検査
手術実施予定日	平成 年 月 日 ()
手術開始時間	AM - PM 時 分
採取予定時間	AM - PM 時 分
患者情報	氏名 性別 (男・女) 族
臨床診断	
提出検体(名)	細胞(10×10mm)様、癌細胞がある場合は剖面で提出できません。 癌細胞のある場合は下記に記入頂き、ご提出下さい。
結果店	無・有 ()
検索希望事項	
検査結果通知場所	TEL - - (内線) (手術室・検査室)
検査結果通知者	科 先生
【検査の提出方法及び注意事項】	
<input type="checkbox"/> 通常検査提出 摘出標本は、15×10×5mm以内で切り出し、生理食塩水を浸したガーゼで包み、冷蔵状態で提出して下さい。	
<input type="checkbox"/> 速達検査提出 摘出標本は10×10×5mm以内で切り出し、生理食塩水を浸したガーゼで包み、常温状態で提出して下さい。但し細胞診検査はして下さい。	
・検査部位が大きい場合は、縫合部に切開をせらるこがあります。	
・速達検査について、当院は速達検査を対応致しません。既に、速達便などと並行して利用した場合は、速達の荷物本数(送付料金)に差異がでたことがあります。	
・細胞診検査は通常の検査と同様に提出して下さい。	
・その他の、提出の際の細かい点は、弊社へお問い合わせ下さい。	
□ 上記内容に同意し、新中迅速検査を申し込みます。	
提出記入欄 上記内容に同意いたしました。	
検査新規提出日	平成 年 月 日 提出者
株式会社 東海細胞研究所 TEL(058)273-4399 FAX(058)273-4392	