


子宮頸部 細胞採取器具

サーベックスブラシ™ 滅菌 / 未滅菌 注1)



※妊娠 10 週目以降の妊婦には使用しないでください

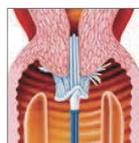

SCJ^{*1} を中心とした子宮腔部
および子宮頸管入り口


- ① 子宮頸管部にサーベックスブラシ™ 滅菌 / 未滅菌の中心を挿入します。
- ② ブラシの肩部を子宮口に軽く押し当ててから時計方向に 5 回転させてください。
- ③ サーベックスブラシ™ 滅菌 / 未滅菌を静かに抜き取ってください。

*1 Squamo-columnar junction, 扁平内柱上皮接合部

サーベックスブラシコンビ™ 滅菌 / 未滅菌 注3)



※妊娠中の婦人には使用しないでください

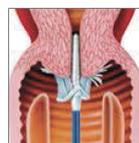


子宮頸管から子宮腔部まで
同時に採取

- ① 子宮頸管部にサーベックスブラシコンビ™ 滅菌 / 未滅菌の中心を挿入します。
- ② ブラシの肩部を子宮口に軽く押し当ててから時計方向に 2 回転させてください。
- ③ サーベックスブラシコンビ™ 滅菌 / 未滅菌を静かに抜き取ってください。

エンドサーベックスブラシ™ 標準タイプ滅菌 注2)



※妊娠中の婦人には使用しないでください

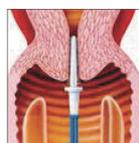

子宮頸管

- ① 子宮頸管部にエンドサーベックスブラシ™ 滅菌を安全リング手前まで挿入します。
- ② 時計方向に 1 回転させてください。
- ③ エンドサーベックスブラシ™ 滅菌を静かに抜き取ってください。

エンドサーベックスブラシ™ S タイプ滅菌 注2)



※妊娠中の婦人には使用しないでください

操作方法はエンドサーベックスブラシ™ 標準タイプ
滅菌を参照してください。

使用上の注意

- ・使用の際は取扱説明書を必ずご参照ください。
- ・再使用禁止。
- ・細胞を採取する際に腔部への潤滑クリーム等の使用は避けてください。

注1) 製造販売届出番号：0781X00003000117 販売名：サーベックスブラシ

注2) 製造販売届出番号：0781X00003000119 販売名：エンドサーベックスブラシ

注3) 製造販売届出番号：0781X00003000118 販売名：サーベックスブラシコンビ

子宮頸部 細胞採取方法

採取時のお願い

採取部位が粘液や帯下で覆われている場合は
シリンジで頸管部を吸引し、表面を綿球などで拭いて
粘液や帯下を取り除いてから
細胞を採取してください。




細胞を的確に採取するため採取前に多少出血する
旨を受診者に説明してください。

ブラシ操作

サーベックスブラシ™ 滅菌 / 未滅菌
サーベックスブラシコンビ™ 滅菌 / 未滅菌




ブラシが半円弧状となっており時計方向に回転させることにより的確に細胞を採取します。

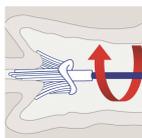

ブラシは弾力性がありますので軽く押し当てただけで十分な細胞量がとれます。
押し当てすぎに注意してください。

BD シュアパス™ 法 (BD シュアパス™ コレクションバイアル)

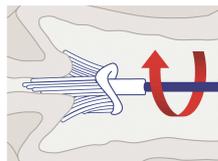

サーベックスブラシ™ の肩部を子宮口に軽く押し当ててから時計方向に 5 回転させてください。




開口部端に先端を引っかけて柄を引き抜いてください。

※エンドサーベックスブラシ™ は蓋ではさんで柄を引き抜いてください



蓋をしっかり締めて提出してください。

直接塗抹法 (コンベンショナル)

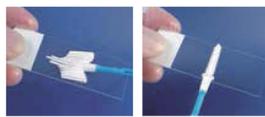

サーベックスブラシ™ または エンドサーベックスブラシ™
サーベックスブラシ™ コンビ
ブラシ両面をすばやく均一に塗抹します。
乾燥しないように注意してください



提出先の固定方法に従って固定し、提出してください。

※弊社では凝固剤用スプレー、輸送用スライド容器、アルコール固定容器等は取扱いしておりません

※日本ベクトン・ディッキンソン(株)ホームページより引用

※HPVとの併用検診の場合、LBC (シンレイヤー法) 後にHPV核酸検出 (簡易ジェノタイプ判定) を行うことが出来ます。